



Titre : **Mode d'emploi**

Projet : **C2118-LegF**

Version : **1**

Remplace le document : n/a (première édition)

Modèle : T-210-26 IFU Mode d'emploi V1



Table des matières

Table des matières	2
Avertissements.....	4
1.1 Explication des symboles.....	4
1.2 Avertissements généraux et précautions.....	4
2 Informations générales.....	5
2.1 Finalité du produit	5
2.1.1 Utilisation prévue.....	5
2.1.2 Contre-indications	5
2.2 Exigences générales.....	6
2.3 Responsabilités de l'utilisateur	6
2.4 Glossaire / Symboles	6
2.5 Données techniques	7
2.6 Structure du produit.....	8
2.7 Description du produit	8
2.8 Sécurité.....	9
2.9 Compatibilité électromagnétique	9
3 Manuel d'utilisation	14
3.1 Conditions de transport	14
3.2 Déballage et première mise en service	14
3.3 Fonction du bouton	14
3.4 Installation et mise en service	15
3.5 Charge	17
3.6 Appairage avec un smartphone	18
3.7 Sélectionner les paramètres.....	19
3.8 Utiliser l'application pour démarrer et mettre en pause le fonctionnement.....	20
3.9 Présentation de l'état	21
4 Service technique.....	22
4.1 Stockage.....	22
4.2 Nettoyage et désinfection.....	22
4.3 Dommages et défauts	22
4.4 Réparations	22
4.5 Inspections techniques et maintenance.....	23
4.6 Durée de vie prévue.....	23
4.7 Dépannage	23
4.8 Protection de l'environnement.....	24
5 Étiquettes.....	25
6 Conditions de garantie	26
6.1 Points d'entretien agréés.....	26

7 Historique du document26

Avertissements

1.1 Explication des symboles



Avertissement

Le non-respect de l'avertissement peut entraîner la mort ou des blessures graves.



Précaution

Indique un danger à faible risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.



Note

Indique les informations pratiques et les conseils qui permettent d'utiliser le produit de manière optimale.

1.2 Avertissements généraux et précautions



Remarques générales

- En cas d'incident grave lié à l'appareil, veuillez le signaler à votre fournisseur et à l'autorité compétente de votre pays.
- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser les appareils LegFit et le conserver pour référence.
- Suivez les instructions de ce manuel lorsque vous utilisez et configurez les appareils LegFit.
- L'utilisation, la manipulation et l'entretien du produit d'une manière non conforme à ce manuel ne sont pas autorisés et peuvent entraîner des dommages à l'utilisateur, pour lesquels le fabricant n'est pas responsable.
- Si le fonctionnement et les paramètres du produit ne sont pas conformes à la description de ce manuel d'utilisation, n'utilisez pas le produit, signalez ce fait au service après-vente.
- Toute réparation de l'appareil médical ne peut être effectuée que par un prestataire de services agréé.
- Sans autorisation, le fabricant ne doit apporter aucune modification au produit.
- Si le produit a été modifié, des inspections et des tests appropriés doivent être effectués pour garantir que le produit puisse être utilisé de manière continue et sûre.
- À l'expiration de la période d'utilisation du produit, il est permis de continuer à l'utiliser après avoir obtenu un résultat positif de l'inspection technique effectuée par un service agréé.



Avertissement

- Si le comportement de fonctionnement des appareils LegFit change de manière inattendue, s'il génère un bruit inhabituel ou si les appareils présentent un dommage visible, cessez de les utiliser et contactez votre fournisseur d'appareils.
- N'utilisez les appareils que pour l'usage décrit dans ce manuel. Une utilisation inappropriée de l'appareil ou toute modification technique des appareils et du matériel fourni peut entraîner des risques pour la santé.



Précautions

- Les appareils ne doivent pas être exposés à une force excessive, tomber ou être secoués.
- Si les appareils LegFit, le chargeur, les câbles du chargeur ou les manchons présentent des dommages visibles, ne les utilisez en aucun cas et contactez votre fournisseur.
- Si vous avez fait tomber l'un des appareils ou le chargeur, examinez-les soigneusement pour détecter tout dommage et effectuez un test fonctionnel avant de réutiliser l'appareil.
- Si l'appareil n'est pas utilisé, éteignez-le.
- Si l'appareil est entièrement chargé, débranchez le chargeur et éteignez l'appareil.
- L'appareil LegFit ne doit pas être utilisé en dehors de la plage de température de +5°C à +40°C.
- Si l'appareil est transporté à une température ambiante inférieure à 5°C, déballez l'appareil et laissez-le atteindre la température ambiante avant d'utiliser le produit ou de le raccorder à l'alimentation électrique. Selon les circonstances, cela peut prendre plusieurs heures.

2 Informations générales

2.1 Finalité du produit

2.1.1 Utilisation prévue

LegFit est un appareil pour la thérapie de compression pneumatique intermittente.

Indications pour l'utilisation

L'appareil est facilement utilisable et peut être préparé par le patient, un proche ou le personnel infirmier. L'utilisateur doit être en mesure de :

- lire et comprendre les instructions et les avertissements.
- monter le manchon sur le mollet de la jambe.
- appuyer sur le bouton marche/arrêt et interpréter le retour visuel ou vibratoire.

LegFit peut être utilisé pour :

- la prophylaxie des thromboembolies
- le traitement des œdèmes
- tous les cas où l'effet de la pompe veineuse musculaire est affaibli

2.1.2 Contre-indications

- Insuffisance cardiaque décompensée

- Thrombophlébite étendue, thrombose ou suspicion de thrombose
- Érysipèle aigu
- Phlegmon aigu
- Syndrome de loge
- Hypertension sévère, non ajustée
- Processus d'occlusion du système lymphatique dans lequel la compression pneumatique intermittente (CPI) entraîne une congestion de l'aîne ou de la région génitale

2.2 Exigences générales

	Température de +5°C à +40°C
	Humidité relative de 10% à 75% sans condensation
	Pression atmosphérique de 700 à 1060 hPa




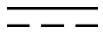
2.3 Responsabilités de l'utilisateur

Toute entité qui régit une affaire en tant que propriétaire, locataire, gagiste, locataire ou autre titulaire de droits sur le bien, ainsi que toute entité qui utilise le produit lui-même ou pour l'usage pour lequel il est utilisé. Selon les définitions de la norme EN 60601-1 : 2006, l'utilisateur peut être l'opérateur ou l'organisme responsable.

L'utilisateur est tenu de s'assurer que le produit est utilisé exclusivement pour l'usage auquel il est destiné et qu'il est utilisé dans les conditions et selon les modalités définies dans ce manuel. L'utilisateur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir un fonctionnement sûr du produit et pour prévenir tout danger pour la vie et la santé de l'utilisateur et du patient et des tiers. Toute manipulation du produit n'est autorisée que par des personnes autorisées et familiarisées avec ce manuel. L'utilisateur doit s'assurer que toutes les personnes manipulant le produit lisent, comprennent et respectent ce mode d'emploi.

2.4 Glossaire / Symboles

	Fabricant		Date de fabrication		Ne doit pas être placé dans les déchets généraux
	Numéro de catalogue		Numéro de série		Appareil médical
	Limite de température		Limitation de l'humidité		Limitation de la pression atmosphérique
	Mode d'emploi		Lire le mode d'emploi		Rayonnement électromagnétique non ionisant

	Marche/Arrêt		Avertissement/Prudence	IP32	L'appareil est protégé contre les corps étrangers solides de 2,5 mm de diamètre et plus, et contre les gouttes d'eau tombant verticalement lorsque le boîtier est incliné jusqu'à 15°.
	Garder au sec		Courant continu		

2.5 Données techniques

Données techniques de l'unité de commande :

Dimensions : 57,3 mm x 131 mm x 20,8 mm

Poids : 140 g

Batterie rechargeable : 3,7 V, 850 mAh Li-Po

Mode : mode continu

Protection IP du boîtier **IP32**

Alimentation électrique : RHD10W050200

Alimentation électrique de classe 2

Entrée : 100-240 V, AC 50-60 Hz, 10 VA

Sortie : 5 V DC 2 A (2 prises)

Certificat : IEC60601-1/ UL

(utiliser uniquement la source d'alimentation approuvée définie ci-dessus)

Caractéristiques techniques du manchon :

Type	No. de référence du jeu de deux manchons	Dimensions Largeur x longueur [mm]	Poids [g]
Cyclique normal	100237	150 x 440	55
Cyclique long	100238	150 x 540	60
Statique normal	100245	300 x 440	75
Statique long	100246	300 x 540	85


Le manchon ne doit être en contact qu'avec une peau intacte.

Le manchon ne doit être utilisé que par une seule personne.

Conditions d'utilisation :

L'appareil doit être utilisé dans un environnement sûr où la température et l'humidité relative sont respectivement comprises entre 5 et 40 °C et entre 10 et 75 %.


2.6 Structure du produit

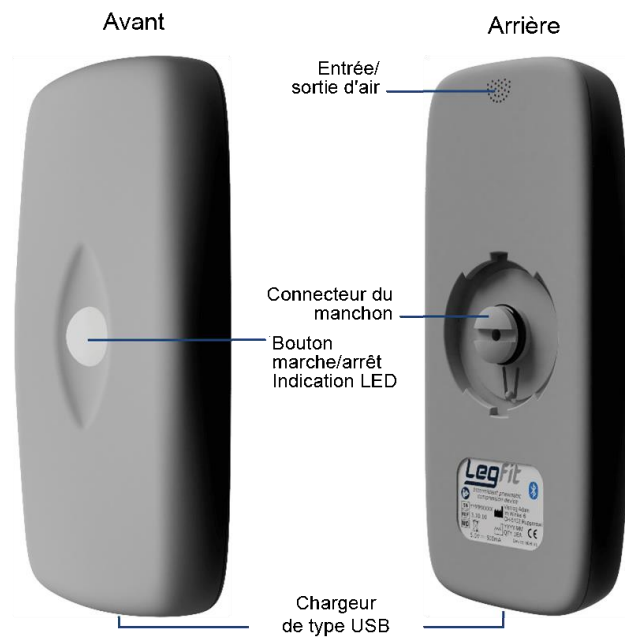

2.7 Description du produit

Le paquet contient deux appareils, un pour chaque jambe. Un appareil se compose de l'unité de commande principale et d'un manchon gonflable. Ces deux parties sont facilement connectables grâce au connecteur du manchon. Les deux appareils sont connectés et synchronisés sans fil à l'aide de la liaison radio Bluetooth Low Energy.

L'unité de commande comporte un bouton qui permet une commande facile. Le manchon est fabriqué dans un matériau respectueux de la peau et agréable.

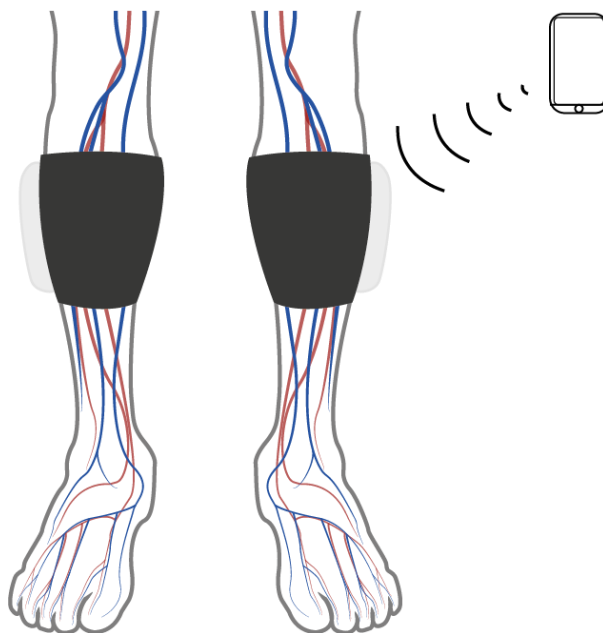

2.8 Sécurité

Lisez ce manuel avant d'utiliser le LegFit. Pour toute question, veuillez contacter ICU tech ou votre distributeur. L'appareil est conforme aux normes EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-1-6 et EN60601-1-11.

- Pendant l'utilisation de l'appareil, vérifiez régulièrement les appareils et assurez-vous de l'ajustement correct du manchon. En cas de douleur, de picotement, de gonflement ou de changement de sensation, retirez le manchon car il est peut-être trop serré. Si la douleur persiste ou si une réaction étrange (par exemple, une réaction allergique) se produit, arrêtez immédiatement d'utiliser les appareils et consultez votre médecin.
- N'utilisez pas le LegFit à proximité de matériaux explosifs ou inflammables. N'utilisez pas le système dans un environnement IRM, dans un caisson hyperbare ou à proximité d'une cheminée ou d'un chauffage radiant.
- Le LegFit ne doit être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné.
- Le LegFit ne doit être utilisé que sur des patients et sur une jambe, toute autre application est interdite.
- Le LegFit ne doit être utilisé que selon la prescription d'un médecin.
- Pour obtenir le meilleur bénéfice clinique, le patient ne doit pas bouger pendant le traitement.
- Le LegFit doit être utilisé dans un environnement propre, exempt de poussière, de saleté, de cheveux, etc.
- Ne plongez pas le LegFit dans un liquide, quelle qu'en soit la raison.
- N'exposez pas le LegFit à des chocs extrêmes, comme une chute de l'appareil.
- Si l'appareil chauffe, gonfle ou dégage de la fumée, arrêtez la charge en débranchant le câble de charge et retirez immédiatement le LegFit de la jambe. Dans les cas graves, un dysfonctionnement de la batterie peut entraîner une fuite de la batterie, ce qui peut provoquer l'inflammation des produits chimiques et entraîner un incendie.
- Gardez le LegFit hors de portée des enfants et des bébés.
- Pendant la charge, ne vous déplacez pas afin d'éviter de trébucher ou de tomber à cause des câbles de charge.
- Le LegFit est classé comme étant porté sur le corps et utilisable en transit.

2.9 Compatibilité électromagnétique


Le LegFit a été testé et a passé avec succès les tests de compatibilité électromagnétique (CEM) des appareils médicaux conformément à la norme IEC 60601-1-2.

Guide et déclaration du fabricant – émissions électromagnétiques		
Le LegFit est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du LegFit doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.		
Test d'émissions	Conformité	Environnement électromagnétique – conseils
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1	Le LegFit utilise l'énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer des interférences dans les équipements électroniques situés à proximité.
Émissions RF CISPR 11	Classe B	Le LegFit peut être utilisé dans tous les établissements, y compris les établissements

Guide et déclaration du fabricant – émissions électromagnétiques		
		domestiques et ceux directement raccordés au réseau public d'alimentation électrique basse tension qui alimente les bâtiments à usage domestique.
Émissions harmoniques IEC 61000-3-2	Classe A	
Fluctuations de tension/ émissions de scintillement IEC 61000-3-3	Est conforme	

Guide et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique			
Le LegFit est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du LegFit doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.			
Test d'immunité	Niveau de test IEC 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique – conseils
Décharge électrostatique (ESD) IEC 61000-4-2	Contact ± 6 kV Air ± 8 kV	Contact ± 6 kV Air ± 8 kV	Les sols doivent être en bois, en béton ou en carreaux de céramique. Si les sols sont recouverts d'un matériau synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
Transitoire électrique rapide / éclatement IEC 61000-4-4	± 2 kV pour les lignes d'alimentation électrique ± 1 kV pour les lignes d'entrée/sortie	± 2 kV pour les lignes d'alimentation électrique ± 1 kV pour les lignes d'entrée/sortie	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique.
Surtension IEC 61000-4-5	Mode différentiel ± 1 kV Mode commun ± 2 kV	Mode différentiel ± 1 kV Mode commun ± 2 kV	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique.
Creux de tension, courtes interruptions et variations de tension sur les lignes d'entrée de l'alimentation électrique IEC 61000-4-11	$< 5\% U_T$ ($> 95\%$ de chute d' U_T) pendant 0,5 cycle $40\% U_T$ (60 % de chute d' U_T) pendant 5 cycles $70\% U_T$ (30 %	$< 5\% U_T$ ($> 95\%$ de chute d' U_T) pendant 0,5 cycle $40\% U_T$ (60 % de chute d' U_T) pendant 5 cycles $70\% U_T$ (30 %	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique. Si l'utilisateur du LegFit a besoin d'un fonctionnement continu pendant les interruptions du réseau électrique, il est recommandé d'alimenter le LegFit à partir d'une alimentation sans interruption ou d'une batterie.

Guide et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique			
	de chute d' U_T) pendant 25 cycles	de chute d' U_T) pendant 25 cycles	
	<5 % U_T (>95 % de chute d' U_T) pendant 5 sec	<5 % U_T (>95 % de chute d' U_T) pendant 5 sec	
Champ magnétique à fréquence d'alimentation (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Les champs magnétiques à fréquence d'alimentation doivent être à des niveaux caractéristiques d'un emplacement typique dans un environnement commercial ou hospitalier typique.
NOTE U_T est la tension AC du secteur avant l'application du niveau de test.			

Guide et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique			
Le LegFit est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du LegFit doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.			
Test d'immunité	Niveau de test IEC 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique – conseils
RF par conduction IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz à 80 MHz	3 Vrms 150 kHz à 80 MHz	Les équipements de communication RF portables et mobiles ne doivent pas être utilisés plus près de n'importe quelle partie du LegFit, y compris les câbles, que la distance de séparation recommandée et calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur. Distance de séparation recommandée $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \text{ 80 MHz à 800 MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \text{ 800 MHz à 2,5 GHz}$ où P est la puissance de sortie maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur et d est la distance de séparation recommandée en mètres (m). Les intensités de champ des émetteurs RF fixes, telles que déterminées par une étude électromagnétique du site, ^a doivent être inférieures au niveau de conformité dans chaque gamme de fréquences. ^b Des interférences peuvent se produire à proximité d'équipements marqués du symbole suivant: 
RF par rayonnement IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz à 2,5 GHz	3 V/m 80 MHz à 2,5 GHz	
NOTE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la gamme de fréquences la plus élevée s'applique. NOTE 2 Ces directives peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.			
^{a.} Les intensités de champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les			

Guide et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique

radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et les radios mobiles terrestres, les radios amateurs, les émissions de radio AM et FM et les émissions de télévision ne peuvent pas être prédites théoriquement avec précision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si l'intensité de champ mesurée à l'endroit où le LegFit est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, le LegFit doit être observé pour vérifier qu'il fonctionne normalement. Si des performances anormales sont observées, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, comme la réorientation ou le déplacement du LegFit.

- b. Dans la gamme de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à $[V1]$ V/m.

Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF portables et mobiles et le [ÉQUIPEMENT ou SYSTÈME]

Le LegFit est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du LegFit peut aider à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et le LegFit, comme recommandé ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale de l'équipement de communication.

Puissance de sortie maximale nominale de l'émetteur W	Distance de séparation en fonction de la fréquence de l'émetteur m		
	150 kHz à 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{V_1}\right]\sqrt{P}$	80 MHz à 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1}\right]\sqrt{P}$	800 MHz à 2,5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1}\right]\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale n'est pas indiquée ci-dessus, la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être déterminée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance de sortie maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur.

NOTE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la gamme de fréquences supérieure s'applique.

NOTE 4 Ces directives peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.



L'utilisation d'accessoires, de câbles, de pièces de rechange autres que ceux proposés et/ou recommandés par le fabricant peut entraîner une augmentation des émissions et/ou une diminution de la résistance du produit aux phénomènes électromagnétiques.

3 Manuel d'utilisation

3.1 Conditions de transport

- Température de -20 à +30°C
- Humidité relative de 10% à 75% sans condensation
- Pression atmosphérique de 700 à 1060 hPa

3.2 Déballage et première mise en service

Chaque paquet contient :

- Deux manchons, un pour chaque jambe
- Deux unités de commande, une pour chaque jambe
- Alimentation électrique avec un câble en Y et 2 prises USB Type-C
- Ce document et un guide de démarrage rapide LegFit

➔ Types de manchons

Les types de manchons suivantes LegFit disponibles sont énumérés au chapitre 2.5. Ils sont utilisés respectivement pour les modes statiques ou cycliques.



Précautions

En cas de dommage visible sur le produit ou si les paramètres diffèrent de ceux décrits dans ce manuel, il ne doit pas être utilisé. Vous devez signaler ce fait au fabricant ou au vendeur. L'utilisation d'un produit défectueux peut entraîner des dommages pour l'utilisateur et pour lesquels le fabricant n'est pas responsable.

Chargez les appareils LegFit uniquement avec l'adaptateur électrique dédié, fourni avec l'appareil.

Avant d'utiliser l'adaptateur électrique, vérifiez que la tension indiquée sur le chargeur correspond à la tension du réseau local.

Les deux appareils doivent être chargés avant la première utilisation. Par conséquent, branchez le chargeur et attendez que les appareils soient complètement chargés. Une fois les appareils chargés, appariez les deux appareils avec un smartphone en utilisant l'application LegFit. Modifiez les paramètres en fonction de vos préférences ou de la prescription du personnel médical qui utilise l'application. Une fois les réglages effectués, le LegFit est prêt à être utilisé.

3.3 Fonction du bouton


Le bouton de l'unité a 3 fonctions différentes, selon la durée pendant laquelle il est enfoncé :

- Pression courte : 0 – 3s
- Pression longue : 3 – 10s
- Pression de réinitialisation : > 10s

Il présente également l'état de l'appareil par sa couleur de lumière, comme décrit au chapitre 3.9.


3.4 Installation et mise en service

Veillez noter que les manchons ne peuvent être en contact qu'avec une peau intacte et ne peuvent être utilisés que par une seule personne.

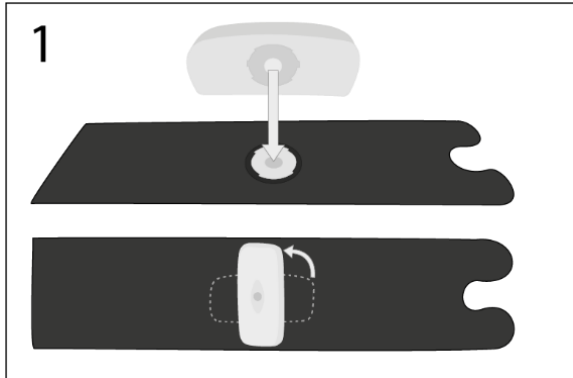


Connecter l'appareil au manchon

Placez l'appareil dans la même orientation que le manchon sur le connecteur du manchon. Si l'appareil est correctement enfoncé, tournez l'appareil de 90°. Assurez-vous que l'appareil est correctement connecté au manchon.

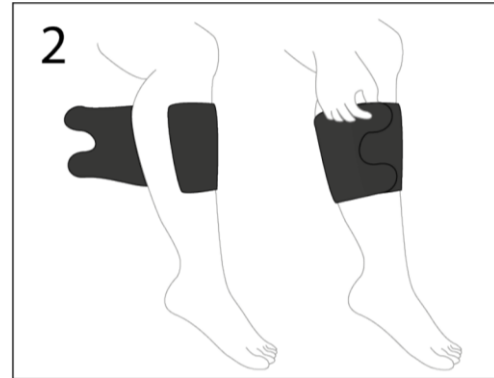


Montage du système

Fixez l'extrémité droite sur la jambe avec une main. Enroulez le manchon autour de la jambe avec l'autre main et fixez le manchon avec le Velcro. Assurez-vous que le manchon est bien enveloppé, sinon serrez le manchon en attachant à nouveau un Velcro après l'autre.

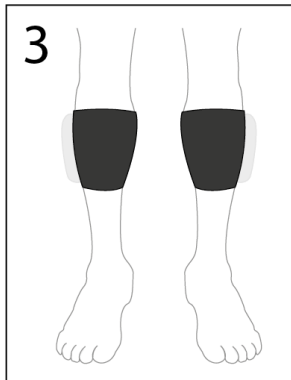


Ajustement correct

Veillez à ce que les chambres à air se trouvent sur le dessus des mollets et les appareils sur l'extérieur des jambes. Les deux manchons montés doivent correspondre au graphique ci-dessus.

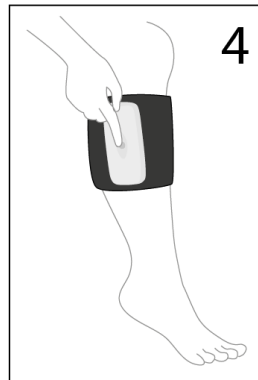

Mise en marche

Pour allumer l'appareil, appuyez brièvement (~1 s) sur le bouton de l'appareil. Répétez cette étape pour le second appareil. Les appareils commenceront automatiquement à générer de la pression. Le cycle de gonflage commence dans les 3 secondes.

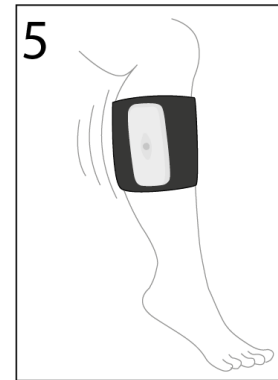


Fonctionnement

Pendant le fonctionnement, l'appareil se gonfle en fonction des paramètres d'intervalle et de pression choisis avec l'application. Les appareils émettent un bourdonnement pendant la génération de la pression, ce qui est normal. Arrêtez chaque unité de commande en appuyant brièvement sur le bouton.

- ➔ Si aucune pression ne peut être générée ou si uniquement une pression insuffisante est générée, l'appareil LegFit passe en mode veille, ce qui est indiqué par l'éclairage pulsé du bouton. Assurez-vous que le manchon est bien attaché au mollet et redémarrez l'appareil en appuyant brièvement sur le bouton.
- ➔ Il est recommandé de laisser l'unité de commande attachée au manchon entre les utilisations.
- ➔ Les unités de commande et les manchons se nettoient facilement avec une serviette humide. Détachez l'unité de commande du manchon avant de le nettoyer.


3.5 Charge

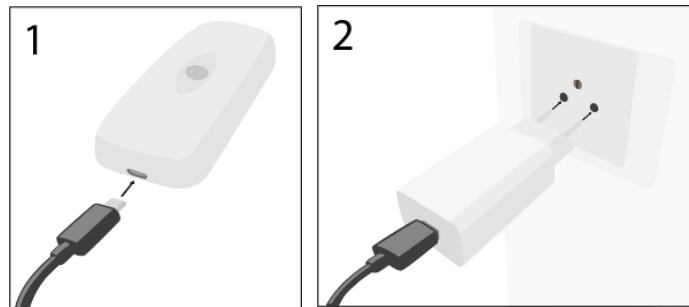

1. Raccordez les deux unités de commande et l'adaptateur électrique avec le câble USB.
 2. Branchez l'adaptateur électrique à la prise secteur.
- ➔ Chargez l'appareil LegFit uniquement avec l'adaptateur électrique fourni.
 - ➔ L'appareil LegFit s'allume et le bouton émet des pulsations blanches, indiquant le processus de charge.
 - ➔ Lorsque la batterie est entièrement chargée, le bouton émet des pulsations vertes. Dans ce mode, l'appareil LegFit peut être éteint avec une pression longue sur le bouton.

3.6 Appairage avec un smartphone

1. Téléchargez l'application LegFit (iOS / Android), disponible dans l'App Store ou le Google Play Store, installez l'application et autorisez toutes les permissions demandées.
2. Éteignez les deux appareils LegFit.
3. Allumez l'un des appareils LegFit avec une pression longue sur le bouton. Le bouton se met à clignoter en bleu.
4. Dans l'application LegFit, appuyez sur l'icône à trois lignes en haut à gauche et sélectionnez « Connexions » dans le menu.
5. Sélectionnez l'appareil avec le numéro de série correspondant.
6. Après un appairage réussi, le bouton se met à émettre des pulsations bleues.

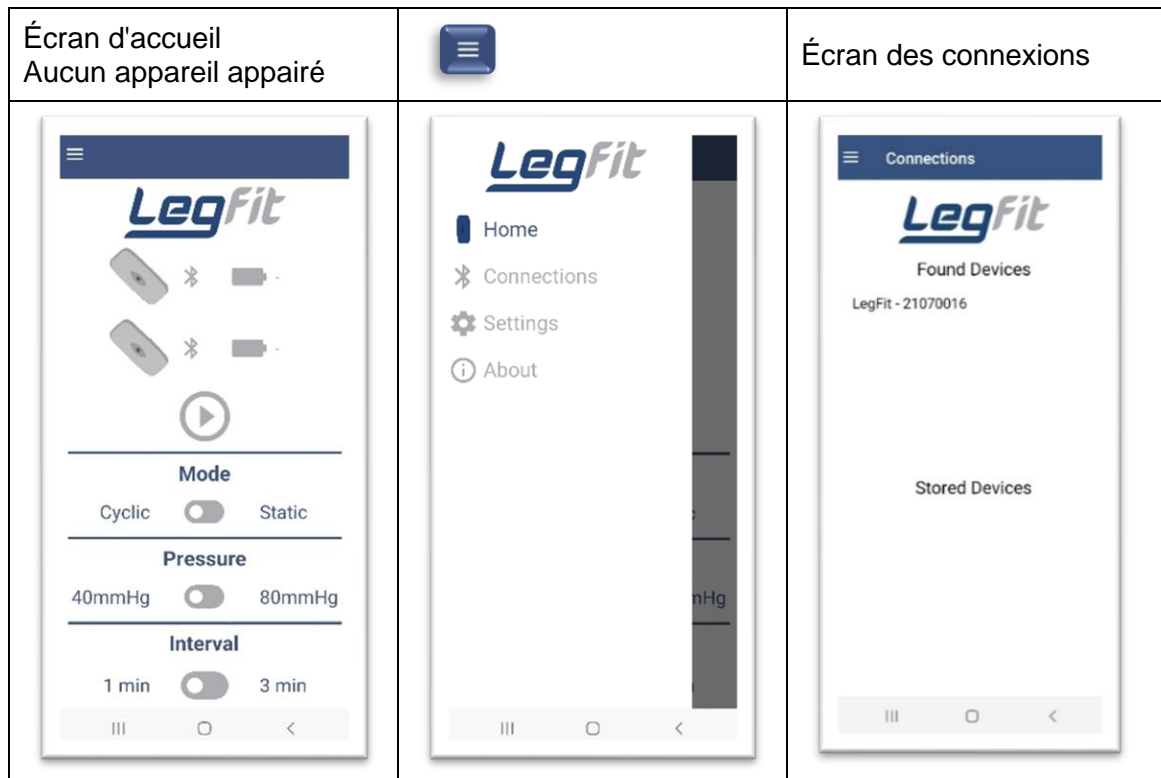

7. Répétez les étapes 3 à 7 avec le second appareil LegFit.

- ➔ Si le couplage échoue, l'appareil s'éteint automatiquement après 3 minutes. Effectuez de nouveau la procédure.
- ➔ L'appareil LegFit peut être éteint manuellement pendant la procédure d'appairage avec une pression longue sur le bouton.
- ➔ Un appareil LegFit ne peut être appairé qu'à une seule application LegFit.

3.7 Sélectionner les paramètres

➔ Les paramètres de l'appareil LegFit ne peuvent être sélectionnés qu'après l'avoir connecté à une application LegFit.

1. Lancez l'application LegFit sur le smartphone.
2. Allumez les deux appareils LegFit en appuyant brièvement sur le bouton.
3. Les appareils précédemment appairés se connecteront automatiquement à l'application LegFit. Pour les unités qui ne sont pas appairées, veuillez effectuer la procédure d'appairage décrite au chapitre 3.6.


<p>Écran d'accueil Les deux appareils se sont appairés Mode cyclique, inactif</p>	<p>Écran d'accueil Les deux appareils se sont appairés Mode statique, inactif</p>

4. Sélectionnez le mode statique ou cyclique
5. Sélectionnez la pression requise pour le mode statique ou la pression et l'intervalle pour le mode cyclique et confirmez la modification.

➔ Si une erreur s'est produite lors de la modification des paramètres, un message sera affiché par l'application LegFit.

3.8 Utiliser l'application pour démarrer et mettre en pause le fonctionnement

1. Lancez l'application LegFit sur le smartphone.
2. Allumez les deux appareils LegFit en appuyant brièvement sur le bouton.
3. Les appareils précédemment appairés se connecteront automatiquement à l'application LegFit. Pour les unités qui ne sont pas appairées, veuillez effectuer la procédure d'appairage décrite au chapitre 3.6.
4. Pour démarrer le fonctionnement, appuyez sur le bouton Démarrer qui se transforme ensuite en bouton Pause. Pour mettre en pause, appuyez sur le bouton Pause qui se transforme ensuite en bouton Démarrer.

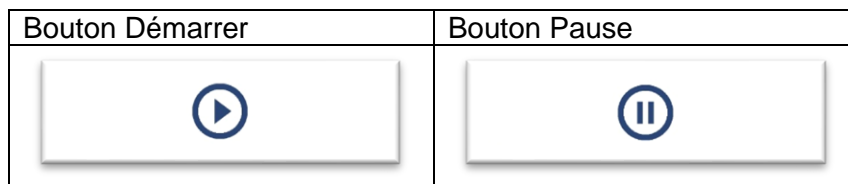












Les captures d'écran ci-dessous présentent le mode statique. Le démarrage et la mise en pause du fonctionnement se font de la même manière pour le mode cyclique.



➔ Si une erreur s'est produite pendant le fonctionnement, un message sera affiché par l'application LegFit.

3.9 Présentation de l'état

Le voyant du bouton indique l'état de l'appareil LegFit :

	<p>Vert fixe</p> <p>Mode normal, génération de pression intermittente ou statique selon les paramètres de pression et d'intervalle, batterie pleine.</p>
	<p>Jaune fixe</p> <p>Mode normal, génération de pression intermittente ou statique selon les paramètres de pression et d'intervalle, batterie faible. Raccordez au chargeur.</p>
	<p>Rouge fixe</p> <p>Mode normal, génération de pression intermittente ou statique selon les paramètres de pression et d'intervalle, batterie vide. Raccordez immédiatement au chargeur.</p>
	<p>Blanc fixe</p> <p>Mode normal, génération de pression intermittente ou statique selon les paramètres de pression et d'intervalle, batterie en cours de charge.</p>
	<p>Pulsations vertes</p> <p>Mode veille, pas de génération de pression, batterie pleine.</p>
	<p>Pulsations jaunes</p> <p>Mode veille, pas de génération de pression, batterie faible. Raccordez au chargeur.</p>
	<p>Pulsations rouges</p> <p>Mode veille, pas de génération de pression, batterie vide. Raccordez immédiatement au chargeur.</p>
	<p>Pulsations blanches</p> <p>Mode veille, pas de génération de pression, batterie en cours de charge.</p>
	<p>Bleu clignotant</p> <p>Mode d'appairage. Prêt pour l'appairage avec un smartphone.</p>
	<p>Rouge clignotant</p> <p>Une erreur s'est produite avec l'appareil LegFit, il s'éteindra dans les 10s s'il n'est pas raccordé au chargeur. Si l'erreur persiste après un redémarrage, contactez votre distributeur local.</p>
	<p>Vert clignotant</p> <p>Mise à jour du firmware par voie hertzienne en cours.</p>
	<p>Le bouton n'est pas allumé</p> <p>L'appareil est hors tension.</p>

4 Service technique

4.1 Stockage



Gardez l'appareil au sec

Avant de ranger l'appareil, éteignez les appareils et débranchez le cordon d'alimentation des appareils. Les appareils doivent être stockés dans un endroit sûr et sec. L'environnement de stockage doit être compris entre -20 et +60°C et avoir une humidité relative de 10 à 75%.

4.2 Nettoyage et désinfection

Éteignez les appareils et débranchez le cordon d'alimentation de l'alimentation principale et des appareils avant le nettoyage et l'inspection.

Un appareil se compose d'un manchon et d'une unité de commande. Pour le nettoyage, les deux parties doivent être déconnectées.

Unité de commande

- N'immergez pas l'unité de commande dans un liquide quelconque.
- Utilisez une serviette humide pour enlever la saleté sur l'unité de commande.
- Utilisez une serviette avec du désinfectant pour nettoyer l'unité de commande.

Manchon

- Déconnectez l'unité de commande du manchon.
- Nettoyez délicatement le manchon à la main avec de l'eau, du savon et du désinfectant.
- Laissez sécher le manchon.
- Retirez la tête de protection de l'orifice de raccordement.

4.3 Dommages et défauts



Avertissement

Les dommages et les défauts détectés sur le produit doivent être signalés immédiatement au service après-vente du fabricant. Un produit qui ne peut pas être utilisé en toute sécurité (les défauts et anomalies n'ont pas été éliminés) ne peut pas être utilisé jusqu'à ce qu'il soit réparé.

4.4 Réparations



Précaution

Les réparations sont effectuées par le fabricant. Vous ne pouvez pas effectuer vous-même des réparations ou des modifications sur le produit sans formation et autorisation spéciales. Une manipulation ou une réparation non autorisée de l'appareil peut entraîner des blessures graves ou, dans le pire des cas, la mort. Après avoir obtenu l'approbation écrite du fabricant pour la réparation par le personnel technique du client, le fabricant fournira les schémas, listes de pièces, descriptions et informations de réparation nécessaires.

Le fabricant autorise uniquement l'utilisation de pièces de rechange d'origine. Pour un fonctionnement sûr et fiable du produit, seules des pièces de rechange fournies par le

fabricant doivent être utilisées. La manipulation des pièces usagées doit être conforme aux réglementations environnementales applicables, voir « Protection de l'environnement - élimination des produits ».

4.5 Inspections techniques et maintenance

L'appareil LegFit doit être inspecté toutes les 500h ou tous les 20 000 cycles de génération de pression par du personnel de service autorisé. L'utilisateur ou la société distributrice ne doit pas effectuer d'inspection ou de maintenance sans l'autorisation du fabricant.

Batterie : N'essayez pas de démonter, d'ouvrir, d'entretenir ou de réparer la batterie. Ne court-circuitez pas les contacts externes, n'écrasez pas, ne percez pas et ne jetez pas la batterie dans le feu ou dans l'eau. Utilisez uniquement une batterie au lithium 3,7 V et un chargeur approuvés par le producteur afin d'éviter tout dommage ou incendie. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, rechargez régulièrement la batterie pour maintenir un bon fonctionnement. Conservez l'appareil dans un endroit sûr et sec.

4.6 Durée de vie prévue

Unité de commande :	2 ans
Tous les types de manchons :	2 ans
Chargeur et câble :	2 ans

La durée de vie prévue et la durée de conservation sont égales.

4.7 Dépannage

En cas d'erreur ou si le système ne répond pas	Une pression longue (>10s) sur le bouton entraîne une réinitialisation de l'appareil. Après avoir relâché le bouton, l'appareil démarre.
Le bouton est fixe ou s'estompe en rouge	La batterie de l'appareil est vide et doit être rechargée
Après avoir généré de la pression, l'appareil reste en état d'attente (bouton qui s'estompe).	Le manchon n'était pas connecté ou trop desserré. Serrez le manchon et relancez la génération de pression en appuyant brièvement sur le bouton.
Si l'état d'attente persiste	Il y a une fuite dans le circuit d'air. Essayez de déconnecter l'unité de commande du manchon. Vérifiez que le joint torique est propre et rebranchez le système. Si l'erreur persiste, contactez votre personnel de service autorisé.
Le bouton clignote en rouge	Surveillance déclenchée, assurez-vous que : <ul style="list-style-type: none"> • la batterie est chargée • l'appareil se trouve dans la plage de température définie • le flux d'air (orifice de raccordement du manchon) est vide Éteignez l'appareil en débranchant le chargeur et en appuyant brièvement sur le bouton, puis redémarrez l'appareil. Si l'erreur persiste, contactez votre personnel de service autorisé.
Pression trop élevée	Si la pression générée est trop élevée et inconfortable, les


	réglages peuvent être adaptés. Connectez-vous à l'appareil et réduisez la pression maximale.
La génération de pression ne s'arrête pas	Si la génération de pression ne s'est pas arrêtée et que le système se bloque, essayez d'éteindre l'appareil avec une courte pression. S'il ne peut pas être éteint, retirez le manchon de la jambe ou déconnectez l'unité de commande du manchon. Effectuez une réinitialisation de l'appareil avec une pression longue (>10s).

4.8 Protection de l'environnement


L'appareil ne doit pas être jeté dans les déchets généraux car il comprend des composants électroniques tels que la batterie. L'appareil doit être éliminé de manière appropriée dans un lieu réservé aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Il en va de même pour l'alimentation électrique et le cordon d'alimentation. Le manchon peut être jeté dans les déchets généraux.

5 Étiquettes

Étiquette de l'unité de commande

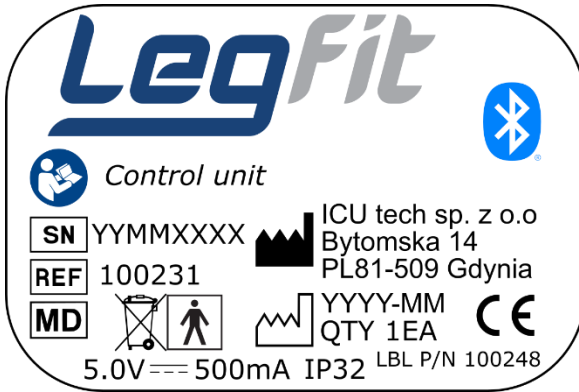

Étiquette de l'emballage

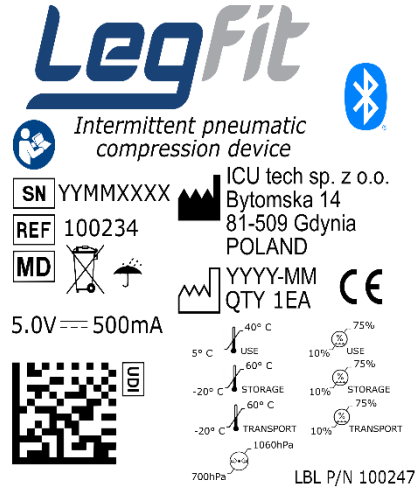


Étiquette du chargeur




Étiquette du câble du chargeur



Étiquette du manchon NC

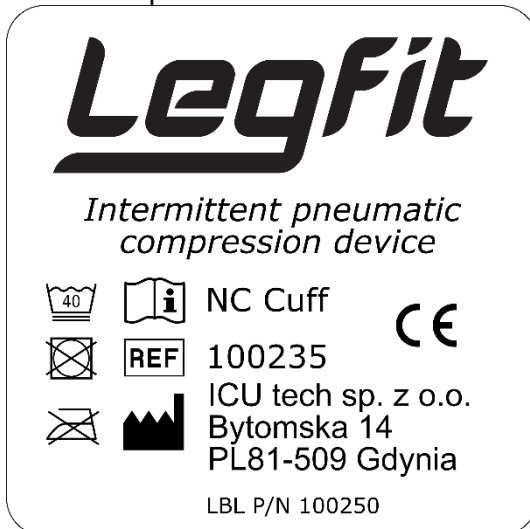

Étiquette du manchon LSL

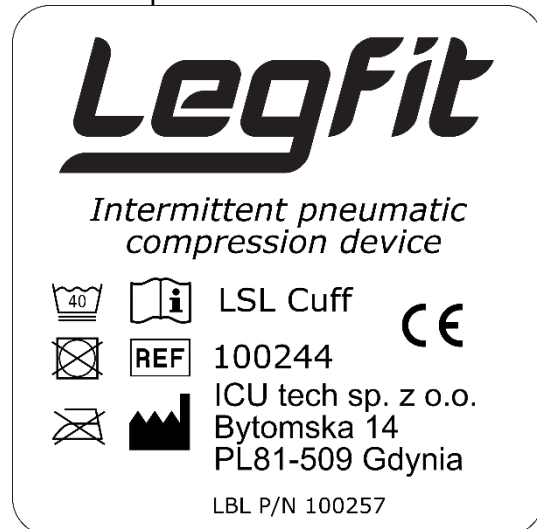

6 Conditions de garantie

Le producteur garantit que son appareil CPI LegFit (« appareil ») est exempt de tout défaut de fabrication et de matériel pendant une période de deux (2) ans à compter de la date de livraison de l'Appareil à l'acheteur initial (« période de garantie »).

La présente garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur initial, n'est pas transférable et ne couvre pas les Appareils qui ont été endommagés pendant le transport, qui ont fait l'objet d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou d'un accident, ou qui ont été utilisés en violation des instructions du fabricant, y compris, mais sans s'y limiter, les instructions contenues dans ce manuel. La seule obligation du Producteur dans le cadre de cette Garantie limitée est, à sa seule discrétion, de réparer ou de remplacer un Appareil qui présente un défaut de fabrication ou de matériau. Il s'agit du seul recours de l'Acheteur.

En plus de cette garantie limitée,

- IL N'Y A PAS D'AUTRES GARANTIES QUE CELLES EXPRESSÉMENT DÉCRITES DANS LA PRÉSENTE.
- DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI, ICU TECH SP. Z O.O. PRODUCTS NE DONNE AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER POUR TOUT PRODUIT OU APPAREIL, QUE CE PRODUIT OU APPAREIL SOIT COUVERT OU NON PAR UNE GARANTIE EXPRESSE CONTENUE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT.
- EN AUCUN CAS ICU TECH SP. Z O.O. NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, SECONDAIRE, CONSÉCUTIF OU INDIRECT (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFITS, D'UTILISATION OU DE TEMPS ENCOURUS PAR L'ACHETEUR OU L'UTILISATEUR FINAL). EN OUTRE, ICU TECH SP. Z O.O. N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES EXEMPLAIRES OU PUNITIFS.

6.1 Points d'entretien agréés

ICU tech sp. z o.o.
Bytomska 14
81-509 Gdynia

7 Historique du document

Date	Version	Auteur	Description des modifications
05/12/2022	V1	MAKR	Première édition